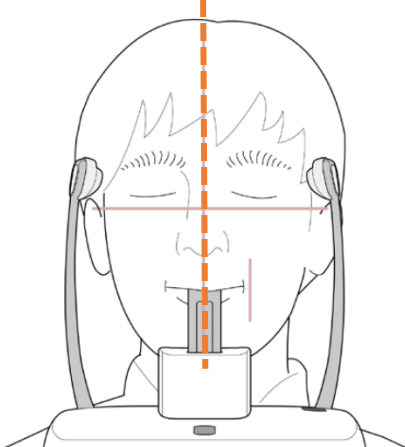
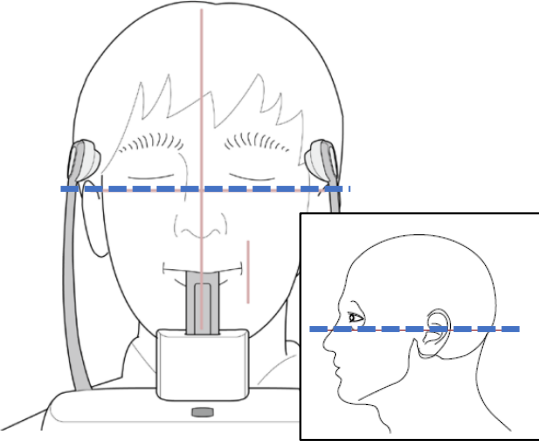
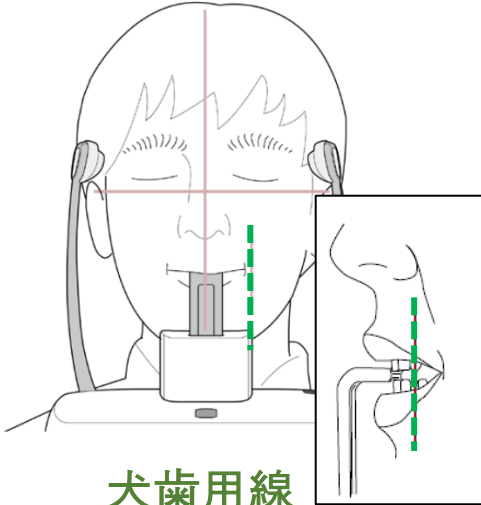


ポジショニング前: 頭部・顔面を含めた首より上の金属製のものを全て取り外します。


<p>1</p>  <p>垂直線</p> <p>眉間中央にビームが通るように顔の位置を調整します。</p>	<p>2</p>  <p>水平線</p> <p>外耳道の上の部分と目の下を結ぶラインが一直線になるように合わせます。</p>	<p>3</p>  <p>犬歯用線</p> <p>患者に歯を見せて笑顔を作るよう指示し、犬歯の中心に犬歯用ビームを合わせます。</p>
--	--	--

ポジショニング後: ■ 患者様に以下の3点を案内します。

- ① 唾を飲み込み、舌を口の天井につけてください。
- ② 鼻で呼吸してください。
- ③ 目を閉じてください。


ポジショニング前: 頭部・顔面を含めた首より上の金属製のものを全て取り外します。

1

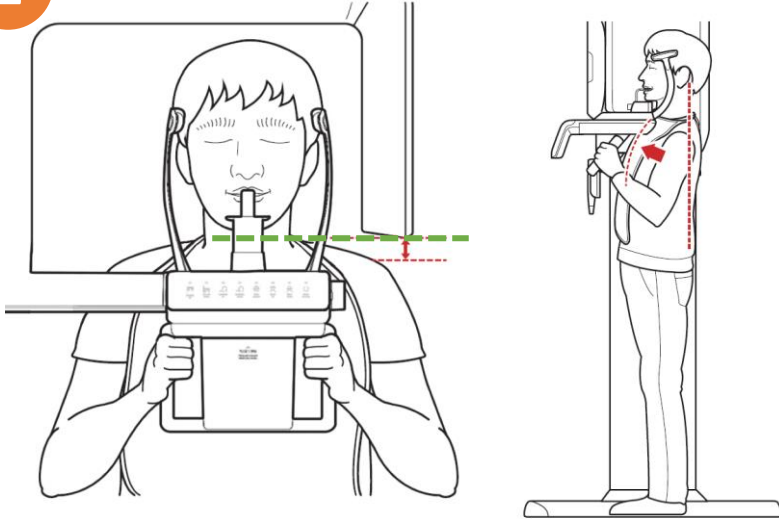

- 正しい姿勢で装置の中央に立ちます。
- 歯の咬合面が床と平行になるように調整します。
- 肩がショールダビームの下になるように調整します。

2

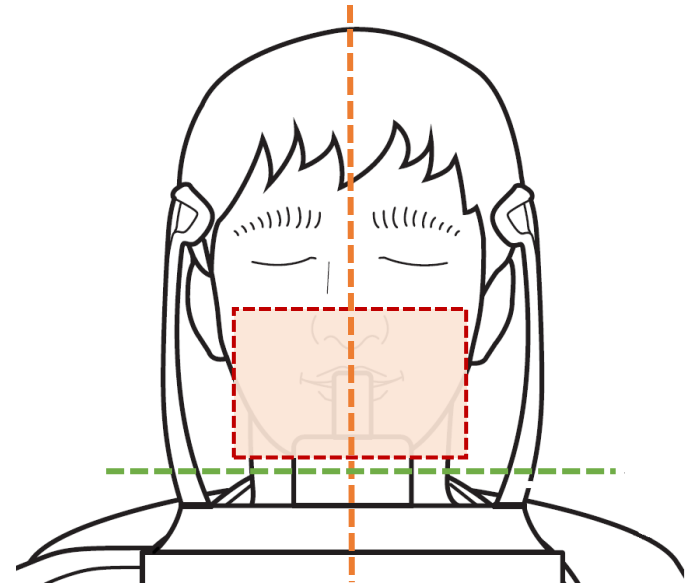


- **垂直ビーム**が眉間中央を通るよう顔の位置を調整します。
- **水平のショールダビーム**はローテーターの高さを表示しますので、肩が当たらないように調整します。

ポジショニング後: ■ 患者様に以下の3点を案内します。

- ① 唾を飲み込み、舌を口の天井につけてください。
- ② 鼻で呼吸してください。
- ③ 目を閉じてください。


ポジショニング前: 頭部・顔面を含めた首より上の金属製のものを全て取り外します。

1

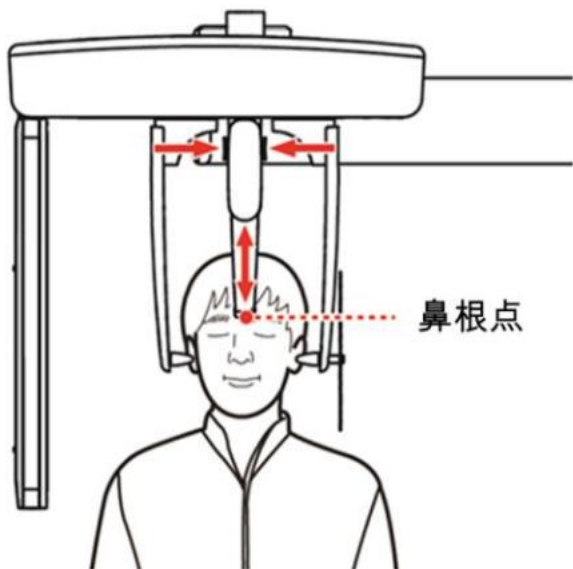

作動中、頭が動かないよう、イヤースタッドを患者の耳に正しく合わせます。次にノーズポジショナーの高さを調整して患者の鼻根点に合わせます。

2

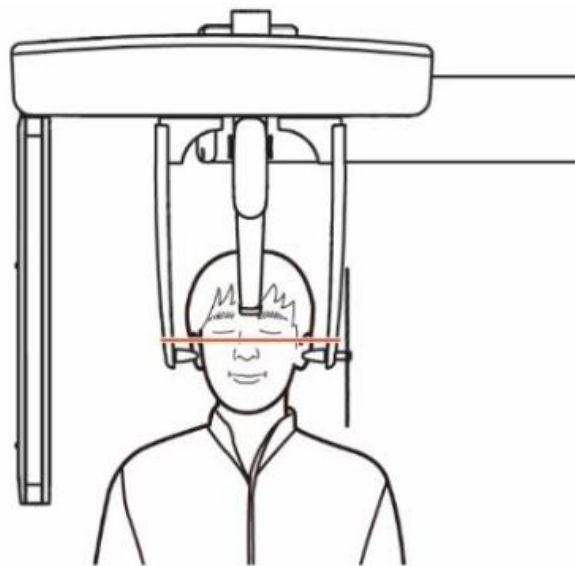

患者の水平線が床と並行になるように水平方向を合わせます。

ポジショニング後: ■ 患者様に以下の3点を案内します。

- ① 唾を飲み込み、舌を口の天井につけてください。
- ② 鼻で呼吸してください。
- ③ 目を閉じてください。