


# PaX-i Plus™ : PANO

**ポジショニング前:** 首より上に身につけている金属製のものを全て取り外します。

**1**

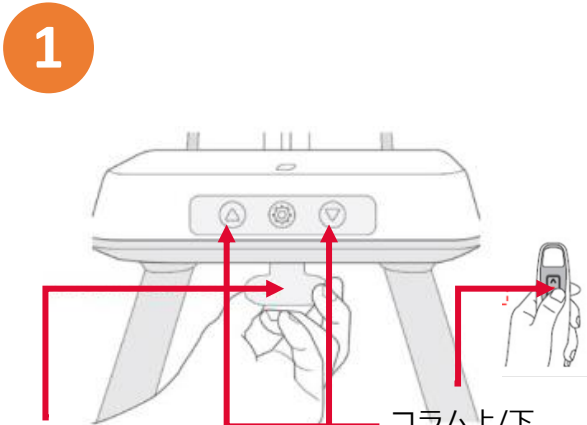


テンプルサポート調整

コラム上/下調整

- テンプルサポートを広げて患者をPaX-i Plusの中に案内します。
- 患者の身長に合わせてコラムを調整します。
- 患者には真っすぐ背中を伸ばして立ってもらい、チンレスト上に顎を乗せてハンドルを握らせます。


**2**

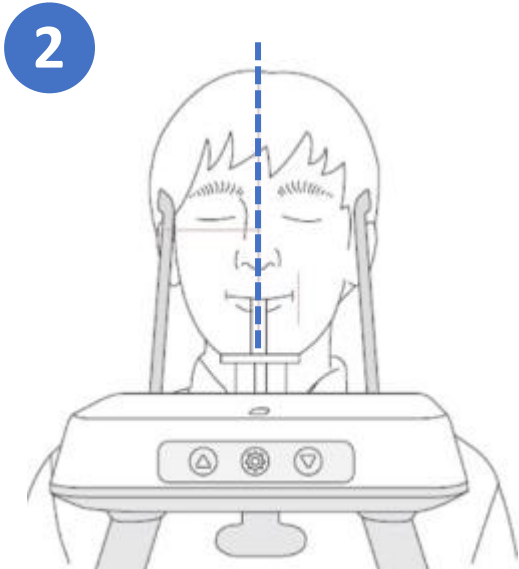

**Mid-Sagittal Beam**

眉間中央にビームが通るように顔の位置を調整します。

**3**

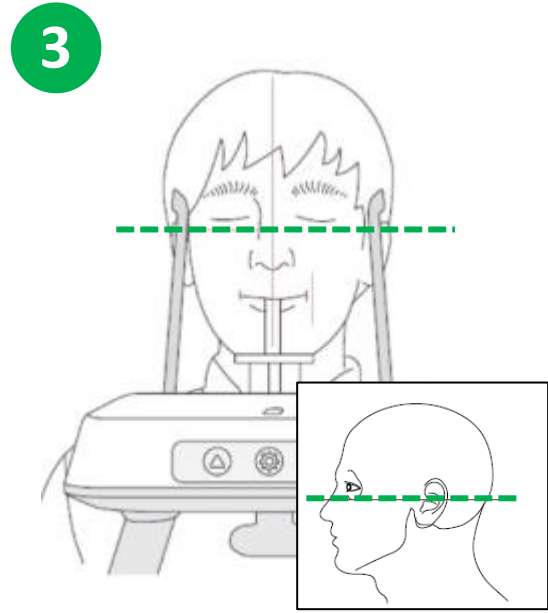

**Frankfurt Plane Beam**

外耳道の上の部分と目の下を結ぶラインが一直線になるように合わせます。


**ポジショニング後:** ■ 患者様に以下の3点を案内します。

- ① 唾をのみこみ、舌を口の天井につけてください。
- ② 鼻で呼吸してください。
- ③ 目を閉じてください。

# PaX-i Plus™ : CEPH


**ポジショニング前:** 首より上に身につけている金属製のものを全て取り外します。

1

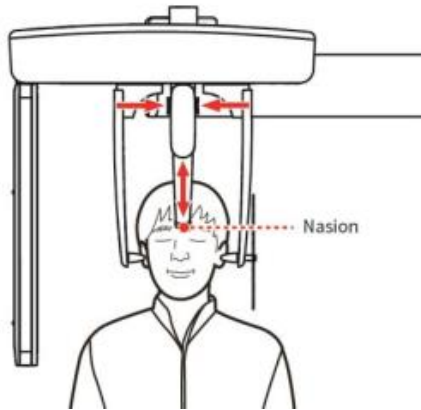


- イヤーロードを調整して患者の頭が動かないようにします。
- ナザルポジショナーの高さを調整して患者のNasionに整列させてください。

2

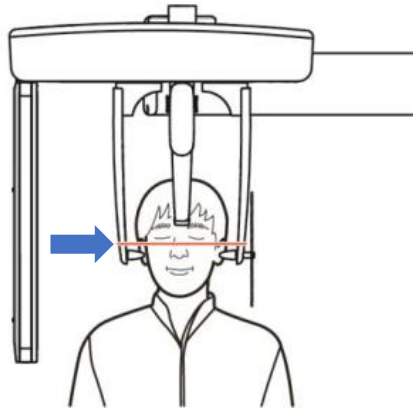

- 患者の外耳道の上の部分と目の下を結ぶフランクフルトラインが床と平行になるように調整します。

3

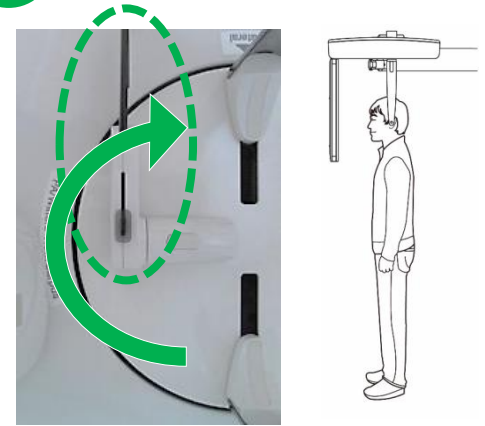

- 撮影モードにより、ナザルポジショナーを上折り畳みます。
- イヤーロードを撮影方向に合わせて回転させ、患者を位置させます。

**ポジショニング後:** ■ 患者様に以下の3点を案内します。

- ① 唾をのみこみ、舌は口の中で平行に保ちます。
- ② 鼻で呼吸してください。
- ③ 目を閉じてください。